

会話補助装置
チャッティー！
取り扱い説明書

この度は「チャッティー！」をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

⚠ 警告

- ・ 液漏れした電池は使わないでください。また、電池から漏れた液体が皮膚などについた場合は、すぐに清潔な水で洗い流してください。
- ・ 音量調整つまみは最小の位置から徐々にまわして音量を上げてください。大きな音量で再生をさせると、周囲の方へ生理的、心理的に危害を与えたり、部品の破損の原因になります。

⚠ 注意

- ・ 録音された音声については、弊社はいかなる保証、責任も負いません。
- ・ スイッチジャックへは、弊社の指定したスイッチを接続してください。弊社の指定していないスイッチをお使いになられたい場合、使用の可否を弊社へお問い合わせください。
- ・ スイッチジャックへお客様の自作されたスイッチを接続された場合の動作保証はしかねます。
- ・ 濡れた手で使用しないでください。また、唾液などの付着にご注意ください。唾液などが付着した場合には、ただちに乾いた布で拭き取ってください。
- ・ 電池は指定された電池を正しい挿入方向でお使いください。指定外の電池を使われた際、また挿入方向を間違われた場合の動作保証はしかねます。
- ・ 本製品は精密機器です。分解や改造をしないでください。
- ・ スイッチジャックやスピーカ部の穴に異物を差し込まないでください。
- ・ シンボルシート挿入口のシート端で指などを切らないようご注意ください。
- ・ 高温、多湿な場所での使用、保管はしないでください。
- ・ 冬季などで低温な場所から多湿な室内などに移動して使用する場合、まれに内部で結露する場合があります。この場合は、1時間程度室温で放置してからご使用ください。

保証書

お名前		お電話番号	-	-
ご住所	〒			
お買い上げ日	年 月 日 (保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間)			
販売店名				

- ・ 正常なご使用において、製造上の不備により故障した場合は、お買い上げ日から6ヶ月間無料修理をいたします。
- ・ 保証書にお買い上げ年月日、販売店名が明記されていることを確認の上、大切に保管してください。
- ・ 保証期間中に修理をご希望の場合には、再度本書の内容をご確認の上、販売店もしくは下記へ保証書を添えてご依頼ください。

連絡先

福祉支援サービス **コムイル**



〒577-0801 大阪府東大阪市小阪2-16-7-102

電話 06-6781-2089 / ファックス 06-6781-2099

ウェブサイト <http://www.comil.jp/> メール info@comil.jp

セット内容

- ☐ 本体
- ☐ シンボルシート
- ☐ 取り扱い説明書（本書）

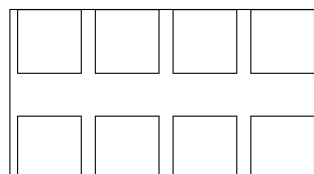
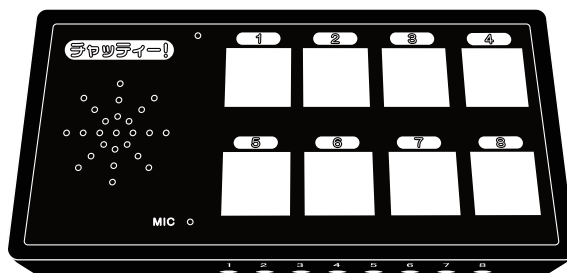


※ 電池は同梱していません。別途ご用意ください。
(アルカリ単三電池 3本使用)

電池の入れ方


1. 本体裏面の電池ボックスにアルカリ単三電池 3本をイラストに指定された方向で入れてください。
2. 再生音が小さくなったり、録音できなくなった際にはすみやかに新しい電池に交換してください。

※ 電池を交換しても録音した音声は消えません。

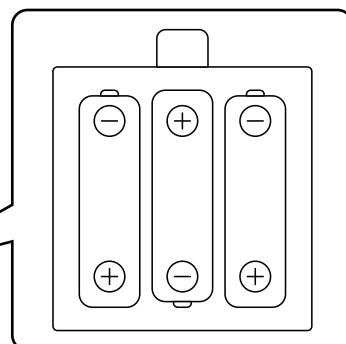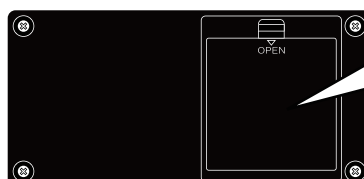

シンボルシートの使い方

1. 付属のシンボルシートの枠内に、油性ペンなどでシンボルなどを描きます。
2. 上面パネル右端のシンボルシート挿入口からシンボルシートを挿入します。
3. シンボルシートが複数枚必要なときや、プリンタ、コピー機などを使ってシートを作るときは、固めの紙をご使用ください。

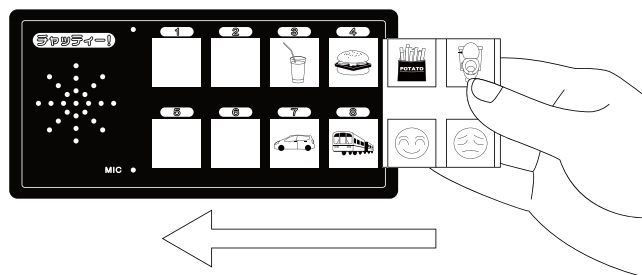

録音の仕方


1. 背面の切り替えスイッチを「録音」側にします。

2. 録音させたいボタンを押さえながら、マイクに向かって発声します。

3. 発声が終わったらボタンを放します。


※ 録音中は確認ランプが点灯します。

※ 別の音声を録音しなおす時には、上記の操作を繰り返してください。

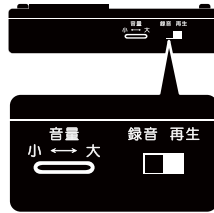

ジュースをのみたい

確認ランプ

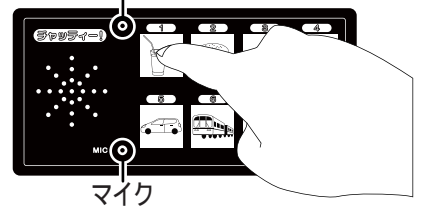

再生の仕方

1. 背面の切り替えスイッチを「再生」側にします。

2. 再生させたいボタンを押すと、録音した音声を再生します。

3. 背面の音量調整つまみで音量を調整してください。


※ 再生音が大きすぎると、周りの方に生理的、心理的被害を与えたり、本機の部品の破損の原因となります。

※ 再生中は確認ランプが点灯します。




ジュースをのみたい

確認ランプ

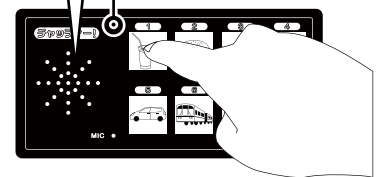

拡張スイッチの使い方

前面パネルスイッチジャックに拡張スイッチを接続すると、上面パネルのボタンを押す代わりにスイッチ操作で再生ができます。

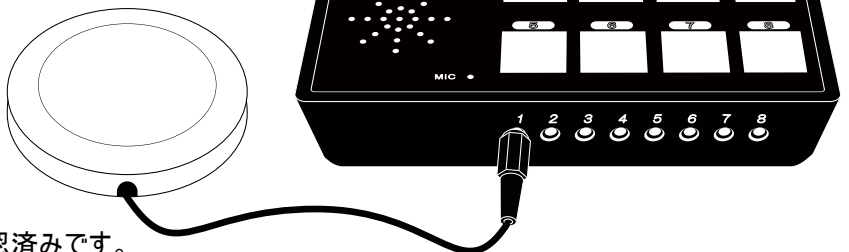

以下のスイッチは動作確認済みです。

コミル製	押しボタンスイッチ、ピンチスイッチ、光電スイッチ、タッチスイッチ
エーブルネット製	ジェリービーンスイッチ、ビッグスイッチ、スパックスイッチ
パシフィックサブライ製	PPS スイッチ
シースターコーポレーション製	タッチセンサ、光電センサ、まばたきセンサ、EOG センサ

上記以外のスイッチをお使いになる場合には、弊社へお問い合わせください。

※ メイク接点出力のスイッチのみ対応しています。オープンコレクタ出力のスイッチには対応していません。

故障かな？と思ったら		
状態	原因	対策
音声を再生しない	切り替えスイッチが「再生」になっていない	切り替えスイッチを「再生」にしてください(録音した音声が消えた場合は録音しなおしてください)
	音量が小さい	音量調整つまみで音量を適切に調整してください
	電池が消耗している	電池を交換してください
	録音した音声小さい	適正な音量で録音しなおしてください
音声が録音できない	切り替えスイッチが「録音」になっていない	切り替えスイッチを「録音」にしてください
	電池が消耗している	電池を交換してください
	録音した音声小さい	適正な音量で録音しなおしてください
音声が割れる	音量が大きい	音量調整つまみで音量を適切に調整してください
	適切な音量で録音されていない	発声を抑えて録音しなおしてください
	息が直接マイクにかかっている	マイクを口元から離して録音しなおしてください
確認ランプが点灯しない	電池が消耗している	電池を交換してください
拡張スイッチを押しても再生しない	スイッチが対応していない、故障している	指定の正常なスイッチをご使用ください

アフターサービス
保証期間：お買い日から6ヶ月間 - 正常なご使用において、製造上の不備により故障した場合は、お買い上げ日から6ヶ月間無料修理をいたします。 - 保証書にお買い上げ年月日、販売店名が明記されていることを確認の上、大切に保管してください。 - 保証期間中に修理をご希望の場合には、再度本書の内容をご確認の上、販売店もしくは下記へ保証書を添えてご依頼ください。 - 以下の場合には保証期間内でも有償修理となります。 ✓ 保証書の提示がない場合 ✓ 保証書の所定事項の未記入もしくは字句を書き換えられた場合 ✓ 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障、損傷の場合 ✓ お買い上げ後の落下、水没などによる故障、損傷の場合 ✓ 火災、地震、落雷、水害およびその他の天災などによる故障、損傷の場合 ✓ 日本国外での使用の場合 - 保証期間後に修理をご希望の場合には、再度本書の内容をご確認の上、販売店もしくは下記へご依頼ください。

発売元	製造元
福祉支援サービス コミル 〒577-0801 大阪府東大阪市小阪2-16-7-102 電話 06-6781-2089 / ファックス 06-6781-2099 ウェブサイト http://www.comil.jp/ メール info@comil.jp	有限会社 テクノサプライ 〒574-0013 大阪府大東市中垣内7-3-3 電話 072-871-4112 / ファックス 072-873-4680