

# スイッチプロセッサ 2(仮)

## 取り扱い説明書

この度は「スイッチプロセッサ」をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

### 警告

- ・ ナースコールなど、生命維持に関わる機器に接続しないで下さい。
- ・ ACアダプタの電源プラグはコンセントにしっかりと挿しこみ、電源コードを踏んだり壁などに固定しないでください。また、付属のACアダプタ以外を使わないでください。漏電や感電、発熱による火災の原因となります。
- ・ 安定した、水濡れや湿気のないところに設置してください。漏電や感電の原因となります。
- ・ 各ジャックや端子、ブザー部の穴に異物を挿しこんだり接触しないでください。感電や故障の原因となります。
- ・ 音量調整つまみは最小の位置から徐々にまわして音量を上げてください。大きな音量で再生をさせると、周囲の方へ生理的、心理的に危害を与えたり、部品の破損の原因になります。

### 注意

- ・ スイッチジャックへは、弊社の指定したスイッチを接続してください。弊社の指定していないスイッチをお使いになられたい場合、使用の可否を弊社へお問い合わせください。
- ・ スイッチジャックへお客様の自作されたスイッチを接続された場合の動作保証はしかねます。
- ・ 濡れた手で使用しないでください。また、水分などの付着にご注意ください。水分が付着した場合には、ただちに乾いた布で拭き取ってください。
- ・ 本製品は精密機器です。分解や改造をしないでください。
- ・ 高温、多湿な場所での使用、保管はしないでください。
- ・ 冬季などで低温な場所から多湿な室内などに移動して使用する場合、まれに内部で結露する場合があります。この場合は、1時間程度室温で放置してからご使用ください。

## 保証書

お名前		お電話番号	-	-
ご住所	〒			
お買い上げ日	年 月 日 (保証期間:お買い上げ日から1年間)			
販売店名				

- ・ 正常なご使用において、製造上の不備により故障した場合は、お買い上げ日から1年間無料修理をいたします。
- ・ 保証書にお買い上げ年月日、販売店名が明記されていることを確認の上、大切に保管してください。
- ・ 保証期間中に修理をご希望の場合には、再度本書の内容をご確認の上、販売店もしくは下記へ保証書を添えてご依頼ください。

### 連絡先

福祉支援サービス **コミル**

〒577-0806 大阪府東大阪市上小阪 3-13-3-104

電話 06-6730-9700 / ファックス 06-6730-9702

ウェブサイト <http://www.comil.jp/> メール [info@comil.jp](mailto:info@comil.jp)

## セット内容

- 本体
- AC アダプタ
- 取り扱い説明書(本書)

## 接続の仕方

1. お使いの操作スイッチを背面の「入力 1」ジャックに接続してください。

以下のスイッチは動作確認済みです。

コミル製	押しボタンスイッチ、ピンチスイッチ、光電スイッチ、タッチスイッチ
エーブルネット製	ジェリービーンスイッチ、ビッグスイッチ、スペックスイッチ
パシフィックサブライ製	ポイントタッチスイッチ、PPS スイッチ(連続複数回入力に設定)

上記以外のスイッチをお使いになる場合には、弊社へお問い合わせください。

※「入力 2」も「1」と同様に使用できます。予備スイッチや介助者用スイッチなどの接続にご活用ください。

※メイク接点出力のスイッチのみ対応しています。オープンコレクタ出力のスイッチには対応していません。

2. 背面の「パソコン」ケーブルとお使いの意思伝達装置などのスイッチ入力ジャックを接続してください。

3. 背面の「呼出」端子台もしくは「呼出」ジャックにブザーやチャイムのコードを接続して下さい。

※ナースコールなど生命維持にかかわる機器には接続しないで下さい。

※端子台へは通常は「NO」と「C」へネジ止めして下さい。

※専用ワイヤレスチャイム送信機は端子台の「NO」と「C」へ接続してあります。

4. AC アダプタのプラグを背面の「DC 入力」ジャックに挿しこみ、AC アダプタを家庭用コンセントに接続して下さい。

※本機には電源スイッチはありません。

## 操作の仕方

1. スイッチ入力を行うと前面の黄色(もしくは橙色)LED が点灯します。
2. 底面の「持続時間」つまみで設定した時間以上スイッチ入力を持続すると、左端の緑色 LED が点灯し、意思伝達装置などへスイッチ入力が伝えられます。
3. さらに前面の「時間調整」つまみで設定した時間以上スイッチ入力を持続すると、赤色 LED が点灯し、接続したブザーやチャイムがなります。

## つまみの設定

1. 時間調整

ブザーやチャイムを操作するためにスイッチ入力を持続する時間を調整します。時計回しに回すと、スイッチ入力を持続する時間が長く必要になります。

2. 音量

内部ブザーの音量を調整します。時計回しに回すと、ブザー音量が大きくなります。必要以上に大きくならないう、調整の際には反時計回しに回しきったところから少しずつ回してください。

## 底面つまみ、ディップスイッチの設定

### 1. 持続時間

意思伝達装置などの操作のためにスイッチ入力を持続する時間を調整します。時計回しに回すと、スイッチ入力を持続する時間が長く必要になります。手の振るえなどがあり、随意と不随意運動を区別したいときなどにご活用下さい。

### 2. 音量配分

(現在のバージョンでは使用していません。)

### 3. ディップスイッチ 1,ディップスイッチ 2

スイッチの持続入力による呼び出しと、スイッチの連続複数回入力による呼び出しを切り換えます。

ディップスイッチ 1	ディップスイッチ 2	設定内容
OFF	OFF	持続入力
OFF	ON	連続 2 回入力
ON	OFF	連続 3 回入力
ON	ON	連続 4 回入力

### 4. ディップスイッチ 3,ディップスイッチ 4

(現在のバージョンでは使用していません。)

## 故障かな? と思ったら

状態	原因	対策
操作スイッチを操作しても「入力」LED が点灯しない	電源が入っていない	AC アダプタが「DC 入力」ジャックおよびコンセントにしっかりと挿入されているか確認してください
	「入力 1」もしくは「入力 2」のジャックに接続されていない	正しく左記のジャックにスイッチのプラグが挿入されているか確認して下さい
操作スイッチを操作しても意思伝達装置などが動かない	意思伝達装置などとの接続がされていない	背面の「パソコン」ケーブルから意思伝達装置などのスイッチ入力端子へ正しく接続されているか確認してください
	設定時間が長すぎる	底面の「持続時間」つまみを一度反時計回しに回しきってから、適切な長さに設定してください
操作スイッチを操作してもチャイムやブザーが鳴らない	チャイムやブザーとの接続がされていない	背面の「呼出」端子、ジャックからチャイムやブザーへ正しく接続されているか確認してください
	設定時間が長すぎる	前面の「時間調整」つまみを一度反時計回しに回しきってから、適切な長さに設定してください

## アフターサービス

### 保証期間：お買い日から1年間

- 正常なご使用において、製造上の不備により故障した場合は、お買い上げ日から1年間無料修理をいたします。
- 保証書にお買い上げ年月日、販売店名が明記されていることを確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に修理をご希望の場合には、再度本書の内容をご確認の上、販売店もしくは下記へ保証書を添えてご依頼ください。
- 以下の場合には保証期間内でも有償修理となります。
  - ✓ 保証書の提示がない場合
  - ✓ 保証書の所定事項の未記入もしくは字句を書き換えられた場合
  - ✓ 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障、損傷の場合
  - ✓ お買い上げ後の落下、水没などによる故障、損傷の場合
  - ✓ 火災、地震、落雷、水害およびその他の天災などによる故障、損傷の場合
  - ✓ 日本国外での使用の場合
- 保証期間後に修理をご希望の場合には、再度本書の内容をご確認の上、販売店もしくは下記へご依頼ください。

### 発売元

### 製造元

#### 福祉支援サービス **コミル**

〒577-0806 大阪府東大阪市上小阪 3-13-3-104  
電話 06-6730-9700 / ファックス 06-6730-9702  
ウェブサイト <http://www.comil.jp/> メール [info@comil.jp](mailto:info@comil.jp)

#### 福祉支援サービス **コミル**

〒577-0806 大阪府東大阪市上小阪 3-13-3-104  
電話 06-6730-9700 / ファックス 06-6730-9702  
ウェブサイト <http://www.comil.jp/> メール [info@comil.jp](mailto:info@comil.jp)